



Instrukcja obsługi i konserwacji, dokument nr: OM-MVU-PL


Produkt: NODIN 4-Folded MEDEVAC Stretcher

NSN: 6530-25-160-2914

REF NT-820MVU



Instrukcja obsługi i konserwacji

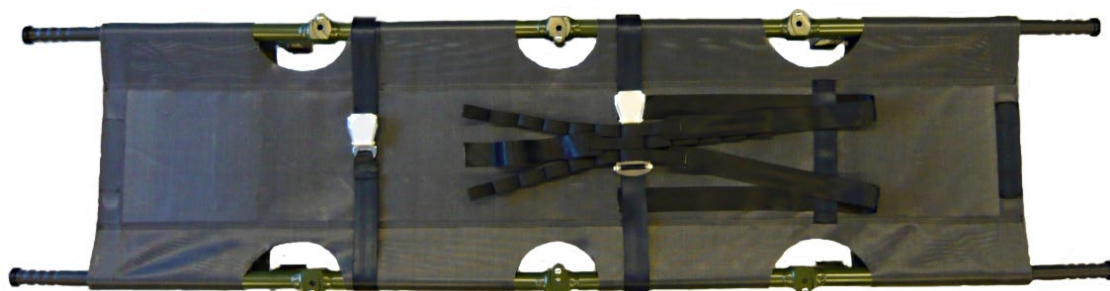

Nosze są urządzeniem służącym do transportu rannych w terenie, w pojazdach, na statkach lub samolotach oraz jako nosze podczas operacji w terenie i/lub rekonwalescencji. Nosze są zaprojektowane do przenoszenia przez dwie osoby i do zawieszenia, zgodnie z normami wojskowymi, w uchwytach noszy. Nosze można również przymocować do stelaży lub stołów chirurgicznych za pomocą wsporników noszy (nózek). Nosze mogą być używane przez każdą osobę, która zapoznała się z instrukcją obsługi.

1. Środowisko operacyjne

4-krotnie składane nosze MEDEVAC firmy NODIN zostały opracowane zgodnie ze standardem NATO 2040 (Nosze, wsporniki nośne i wsporniki mocujące), a także STANAG 3204 AMD (Aero Medical Evacuation), załącznik E, w celu ułatwienia bezpiecznego transportu pacjentów pojazdami lądowymi, okrętami wojennymi lub pojazdami powietrznymi. Nosze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić integrację różnego sprzętu medycznego. Działa bez problemów funkcjonalnych w temperaturach od -40 do + 70 C°

2. Działanie

a) Rozkładanie noszy

Umieść nosze na ziemi z uchwytami skierowanymi do góry.

Wyciągnij uchwyty teleskopowe.



Popchnij drążki noszy w kierunku podłoża, a następnie rozsuń je, aby umieścić drążki noszy poziomo na podłożu.
Przekręć drążki na zewnątrz. Spowoduje to skierowanie wsporników noszy do góry i umożliwi wyprostowanie dwóch trawersów w celu rozciągnięcia tkaniny.



Dwa drążki poprzeczne można zablokować za pomocą dwóch środków:

1. Ustaw się na środku noszy i pociągnij drążki poprzeczne w kierunku środka noszy, aż zostaną zablokowane w odpowiednim położeniu.



2. Ustaw się po zewnętrznej stronie noszy, trzymając uchwyty noszy i użyj stopy, aby przesunąć drążek poprzeczny w kierunku środka, aż znajdzie się na swoim miejscu. Powtórz czynność dla przeciwnej strony.



.....

Aby zapobiec niezamierzonemu złożeniu się trawersów podczas użytkowania. Zabezpiecz dwa drążki poprzeczne, przesuwając dwa plastikowe zaciski zabezpieczające w kierunku środkowego zawiasu.

POZYCJA ZABLOKOWANA
POZYCJA ODBLOKOWANA



Sprawdź poprawność montażu wiązki przewodów.
Nosze są gotowe do użycia




W przypadku korzystania z regulowanego oparcia należy zapoznać się z oddzielną instrukcją obsługi.

b) Zabezpieczanie pacjenta

Upewnij się, że pacjent jest mocno zabezpieczony, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pacjenta, a także bezpieczeństwo ratowników.



Pasy bezpieczeństwa: Wyreguluj długość paska krokowego i pasków naramiennych, umieszczając męską klamrę w odpowiednich kieszeniach na paskach (pasek krokowy umieszcza się pomiędzy dwoma paskami naramiennymi na męskiej klamrze).

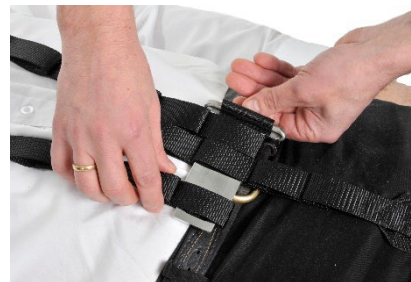

Pasy bezpieczeństwa są prawidłowo zapięte, gdy klamra wydaje dźwięk kliknięcia. Zaciśnij pasek brzuszny, pociągając za luźne końce męskiej i żeńskiej klamry.

Zwolnij klamrę, podnosząc pokrywę klamry żeńskiej i wyciągnij klamrę męską.



Pas bezpieczeństwa na nogi jest zabezpieczony poprzez włożenie męskiej klamry do żeńskiej klamry. Pociągnij za luźny koniec żeńskiej klamry, aby napiąć uprząż na nogi. Zwolnij klamrę, podnosząc pokrywę żeńskiej klamry i wyciągnij męską klamrę.

c) Składanie noszy


Przed rozpoczęciem składania noszy należy zamontować pasy bezpieczeństwa..



Naciśnij przycisk zwalniający uchwyt teleskopowy i przesunij uchwyt do pozycji wewnętrznej.



Obróć nosze do góry nogami i odblokuj zaciski zabezpieczające belkę poprzeczną, odsuwając je od środkowego zawiasu. Zwolnij trawersę, wypychając jej środek na zewnątrz.

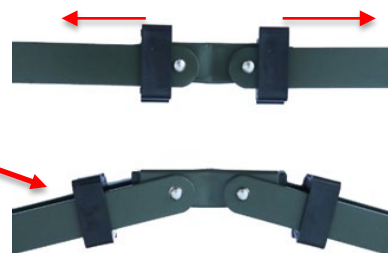

Przekręć uchwyty/słupki noszy do wewnątrz. Spowoduje to złożenie wsporników noszy do środka noszy.



Złóż nosze na boki, pociągając za dwa drążki noszy.

Rozpocznij składanie noszy, podnosząc końce uchwytu.

UWAGA: Upewnij się, że tkanina nie przylega do zawiasów (powinna być luźno umieszczona po wewnętrznej stronie zawiasów).

Złóż oba końce uchwytu w kierunku środka noszy, odwróć je do góry nogami i wykonaj ostateczne złożenie.



3. Konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić nosze z uprężami i klamrami, aby zapewnić bezpieczny transport pacjentów. Po użyciu należy upewnić się, że nosze są czyste i suche przed złożeniem i przechowywaniem.

Czyścić wodą z dodatkiem VirKon i/lub PeraSafe. Można również czyścić roztworem wybielacza chlorowego BAYZID zmieszanego z wodą w stosunku 1:9.

Myjki wysokociśnieniowe mogą być używane z ciśnieniem do 80 barów w odległości 30 cm z wodą o temperaturze 80 stopni. Blejtram może wytrzymać gotowanie.

Wszelkie płyny ustrojowe muszą zostać usunięte, a obszar zdezynfekowany przed ponownym użyciem. Żadne inne czynności konserwacyjne nie są wymagane.

4. Przechowywanie

Nosze należy przechowywać w suchym miejscu, bez bezpośredniego światła słonecznego, aby zoptymalizować żywotność i zapewnić gotowość do użycia. Przed przechowywaniem należy osuszyć nosze, aby uniknąć pleśni i pogorszenia jakości tkaniny, upręży i elementów metalowych.

5. Wypadek

Jeśli dojdzie do wypadku związanego z noszami, należy to zgłosić producentowi.

6. Utylizacja po zakończeniu użytkowania

Wszystkie metalowe części można poddać recyklingowi.

7. Urządzenia przeznaczone do użytku

Poniższy sprzęt jest przeznaczony do bezpiecznego użytkowania wraz z noszami. Informacje na temat sposobu użytkowania znajdują się w instrukcji każdego produktu.

Numer części:	Sprzęt:	Numer części	Sprzęt:
NT-821IVP	IV-pole	NT-832MRL	Medical Rail Long
NT-833MPO	Medical Pole	NT-827SEB	Stretcher equipment Bridge
NT-837MEX	Medical Pole Extender	NT851ABR	Adjustable Backrest
NT-834IVH	Medical Pole IV-Hook	NT-823SAR	Stretcher Armrest
NT-835SIT	Stretcher IV-traverse	NT-822MAD	Stretcher Mattress
NT-831MRS	Medical Rail Short	NT-880TSS	Tilttable Stretcher Stand